


Instructions for use:

Instructions pour l'usage | Instrucciones para el uso

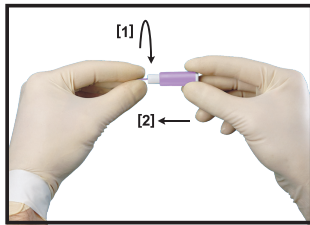

Twist off the protective cap and then pull it straight out.

Dévissez le capuchon et retirez le parallèlement à l'axe du piqueur. | Desenrosca el capuchón y luego tirarlo en línea recta



Press the lancet firmly against the puncture site to activate the device.

Appuyez le lancette contre la zone de ponction pour actionner le dispositif. | Apretar fuertemente en el sitio donde se tiene que aplicar la inyección para activar la lanceta.



Gently apply intermittent pressure near the puncture site to obtain the required blood volume.

Effectuez une pression intermittente près de l'endroit piqué pour obtenir le volume de sang nécessaire. | Seguir apretando de manera suave y discontinua la zona circundante al área de inyección para obtener el volumen adecuada de sangre.

A^{Pro} ADVANTAGE[®]
by **NDC**

Discard used lancet into a sharps container in accordance with facility guidelines, national and state regulations.

Éliminer la lancette usagée dans un conteneur prévu à cet effet et conforme aux règles en vigueur. | Deseche la lanceta en un contenedor adecuado siguiendo las prácticas del establecimiento; y las normas estatales y del país.

WARNING: Do not use if protective cap as been previously removed from lancet

ATTENTION: N'utilisez pas la lancette si sa protection a été précédemment enlevée

ATENCIÓN: Jamás usar la lanceta si se le ha retirado con anticipación su cubierta de protección